

SKED ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
NESPOKOJTE SE S PRŮMĚREM



Český návod k obsluze pro Vás připravil:

Stimax International, s. r. o., Hasičské obchodní centrum, Brožíkova 830/6, 415 01 Teplice

telefon: 472 714 017, fax: 226 015 693, e-mail: info@e-hasici.cz

<http://www.e-hasici.cz>

Hasičské **O**bchodní **C**entrum

SKED[®] NOSÍTKA

KOMPLETNÍ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM



NÁVOD K OBSLUZE

Gratuluje Vám k zakoupení Sked® Záchraného systému. Tento systém Vám umožní záchrané akce vykonávat rychleji, bezpečněji a jednodušeji. Sked® nosítka vycházejí z úplně jiného konceptu výroby nosítek. Proto by se měli potenciální záchranáři obeznámit a přezkoušet si používání Sked® předtím, než budou tato nosítka použita při skutečné záchrané akci.

Sked® nosítka poskytují pacientům výjimečnou oporu a ochranu. Navzdory tomu, nejsou tato nosítka vyvinuta jako zařízení na znehybnění páteře! Jestliže existuje podezření na zranění páteře, zajistěte pacienta schváleným zařízením na znehybnění páteře předtím, než pacienta umístíte na Sked® nosítka. Sked® nosítka jsou kompatibilní s dlouhými a krátkými nosnými rámy, lžícovými nosítky, Oregon Spine Splint II™, jakožto i s většinou ostatního znehybnujícího vybavení.

Pro pacienty, kteří utrpěli zranění v oblasti plic, je potřebné použít nosný rám v kombinaci se Sked® nosítkami.

NIKDY NESPOUŠTĚJTE SKED® NOSÍTKA JEN POMOCÍ JEDINÉ LANOVÉ SMYČKY. Použijte smyčky a popruhy způsobem, na který jsou určeny. Sked® nosítka by měla být skladována v originálním obale, déle trvající vystavení slunečnímu záření (UV záření) může poškodit plast. Sked co. vyrábí i jiné komponenty pro Sked®. Tyto komponenty Vám umožní využít Sked® v mnohých různých typech záchraných akcí. Uzavřený prostor, záchrana ve výškách, ve složitém terénu, armádě, vodní záchraně – to jsou některé možnosti použití Sked® nosítek. Bližší informace o vhodných komponentech jsou dostupné v Sked co. katalogu.

VŽDY používejte zajišťovací lano, když zdviháte Sked®, nebo jakýkoliv jiný druh nosítek pomocí helikoptéry, neboť bez něho může dojít k rotaci nosítek.



Děkujeme Vám za zakoupení Sked® Záchraného systému.

V případě jakýchkoliv otázek, připomínek nebo návrhů zavolejte nebo napište na naši adresu. Vždy oceňujeme zpětnou vazbu od našich zákazníků.

Váš SKEDCO, INC.

VOLITELNÁ RYCHLOPŘIPOJITELNÁ/ODPOJITELNÁ SPONOVÁ VÝSTROJ

POZOR: pouze pro použití na zemi! Ne ve výškách!

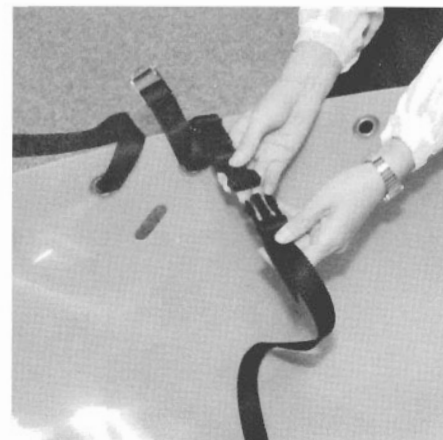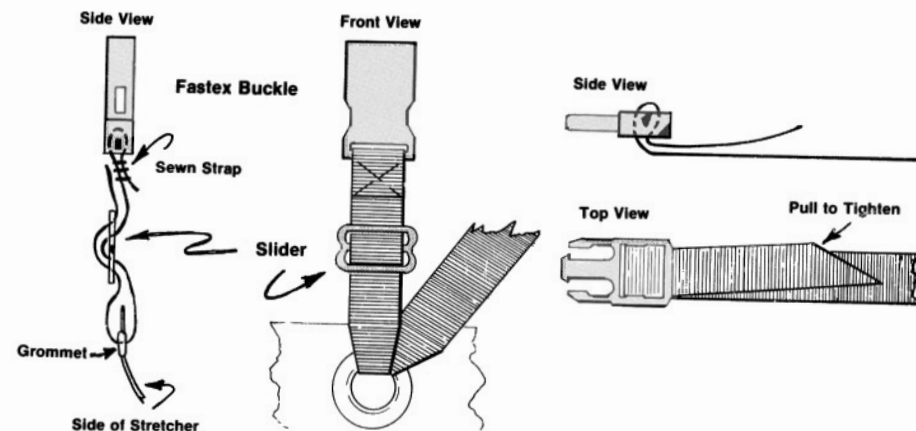

POZNÁMKA:

PACIENT MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NA SCHVÁLENÉM ZNEHYBŇOVACÍM ZAŘÍZENÍ PÁTEŘE, POKUD EXISTUJE PODEZŘENÍ TAKOVÉHO ZRANĚNÍ. FIXACI JE NUTNÉ VYKONAT PŘED UMÍSTĚNÍM PACIENTA NA SKED® NOSÍTKA.

BALENÍ SKED® NOSÍTEK



1. POLOŽTE NOSÍTKA A UMÍSTĚTE STAHOVACÍ POPRUH SPONOVOU STRANOU NASPOD, POD DOLNÍ KONEC SKED® NOSÍTEK.



2. ZAČÍNÁJÍC HLAVOVÝM KONCEM, ZAVIŇTE SKED® NOSÍTKA, TAK TĚSNĚ, JAK JE TO MOŽNÉ.




3. POKRAČUJTE V ROLOVÁNÍ SKED® NOSÍTEK ZA POUŽITÍ KOLENA, ABYSTE ZAJISTILI NOSÍTKA PROTI OPĚTOVNÉMU ROZVINUTÍ.



4. UPEVNĚTE PŘEDEM PŘIPRAVENÝ STAHOVACÍ POPRUH DO SPONY A ULOŽTE SKED® NOSÍTKA DO PŮVODNÍHO (ORIGINÁLNÍHO) OBALU.

ROZBALENÍ SKED® NOSÍTEK A POLOŽENÍ NA ROVNOU PLOCHU

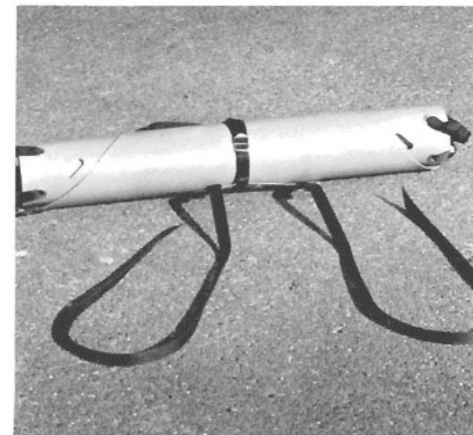

1. VYJMĚTE SKED® Z PŮVODNÍHO OBALU A POLOŽTE NA ZEM.



2. UVOLNĚTE ZAJIŠŤOVACÍ POPRUH, POSTAVTE SE NA SPODNÍ STRANU SKED® A ÚPLNĚ ROZVIŇTE OPAČNÝ KONEC.



3. OHNĚTE SKED® NA POLOVINU A SVIŇTE Z OPAČNÉ STRANY. TOTO ZOPAKUJTE I S OPAČNÝM KONCEM NOSÍTEK.



4. SKED® NOSÍTKA BUDOU NYNÍ LEŽET ROVNĚ.

UMÍSTĚNÍ PACIENTA NA SKED®: METODA PŘEVALENÍ



1. UMÍSTĚTE SKED® NOSÍTKA VEDLE PACIENTA. UJISTĚTE SE, ŽE VRCHNÍ KONEC NOSÍTEK JE UMÍSTĚN U HLAVY PACIENTA. KŘÍŽOVÉ POPRUHY UMÍSTĚTE POD NOSÍTKA.



2. PŘEVALTE PACIENTA A PODSUŇTE SKED® TAK DALEKO POD PACIENTA, JAK JE TO JEN MOŽNÉ. JEMNĚ PŘETOČTE PACIENTA NA SKED® NOSÍTKA.



3. POSUŇTE PACIENTA DO STŘEDU SKED® NOSÍTEK, UJISTĚTE SE, ŽE PÁTEŘ JE V CO NEJNAPŘÍMENĚJŠÍ POLOZE.



4. VYTÁHNĚTE POPRUHY ZPOD SKED® NOSÍTEK A UPEVNĚTE JE DO SPON. (VIZ STRANA 5)

BATOH/VLEČNÝ POSTROJ



4. PŘEVEĎTE KONCE LANA NAD KONEC SKED® NOSÍTEK. PŘEVLEČTE JE SKRZ NOSNÉ RUKOJETI A ZAJISTĚTE DVOJITÝM UZLEM.



1. PŘIPOJTE JEDEN KONEC BATOHU A JEDEN KONEC NA VLEČNÝ POPRUH RUKOJETI. BATOH JE POUŽITELNÝ JAKO VLEČNÝ POSTROJ.

JINÉ PRÍSLUŠENSTVÍ SNÍMATELNÉ POPRUHOVÉ RUKOJETI



1. SÉRIE 4 SNÍMATELNÝCH POPRUHŮ RUKOJETÍ UMOŽŇUJE, ABY SKED® NOSÍTKA MOHLO NĚST AŽ 8 ZÁCHRANÁŘŮ SOUČASNĚ. PROVLEČTE JE SKRZ NEPOUŽITÉ LANOVÉ SMYČKY NA BOCÍCH SKED® NOSÍTEK.



4. SKED® NOSÍTKA TEĎ BUDOU LEŽET ROVNĚ

SVISLÝ VZESTUP/SESTUP

9 METROVÁ DÉLKA 9,5MM STATICKÉHO HOROLEZECKÉHO (KERNMANTLE) LANA S OSMOVÝM UZLEM UVÁZANÝM VE STŘEDU SE POUŽÍVÁ NA KONFIGURACI SKED® NOSÍTEK PRO SVISLÝ VZESTUP/SESTUP.



1. PROVLEČTE KAŽDÝ Z KONCŮ LANA SKRZ LANOVÉ SMYČKY NA STRANĚ HLAVY NOSÍTEK. TAHEJTE AŽ SE UZEL NEDOTÝKÁ NOSÍTEK.



1A. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB PRO POUŽITÍ VE VELMI STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH.




2. POKRAČUJTE VE VEDENÍ LANA SKRZ NEPOUŽITÉ LANOVÉ SMYČKY A NOSNÉ RUKOJETI SKRZ CELÁ NOSÍTKA AŽ K DOLNÍMU KONCI. UJISTĚTE SE, ŽE OBA KONCE LANA JSOU STEJNĚ DLOUHÉ.



3. PROVLEČTE KONCE LAN SKRZ LANOVÉ SMYČKY NA DOLNÍM KONCI SKED® NOSÍTEK Z VNITŘNÍ STRANY SMĚREM VEN. UVAŽTE KONCE LANA SPOLU POMOCÍ DVOJITÉHO UZLU.

UMÍSTĚNÍ PACIENTA NA SKED®: METODA PODSUNUTÍ

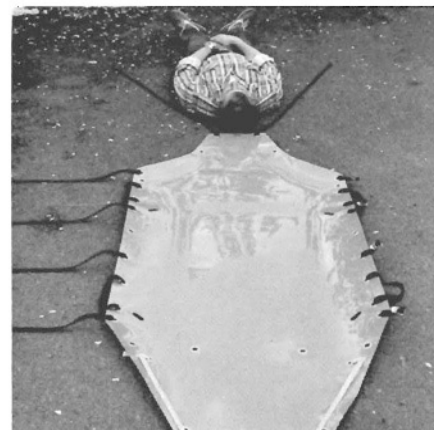

1. UMÍSTĚTE DOLNÍ KONEC SKED® NOSÍTEK K HLAVĚ PACIENTA.



2. JEDEN ZÁCHRANÁŘ SE MUSÍ ROZKROČIT NAD NOSÍTKAMI A PODEPŘÍT PACIENTOVI HLAVU, KRK A PLECE.




3. CHYŤTE SPODNÍ POPRUHY SKED® NOSÍTEK A PODSUŇTE NOSÍTKA POD PACIENTA.



4. VYROVNEJTE PACIENTA NA SKED® NOSÍTKÁCH A UPEVNĚTE POPRUHY DO SPON (VIZ STRANA 5).


JAK UMÍSTIT A UPEVNIT POPRUHY DO SPON

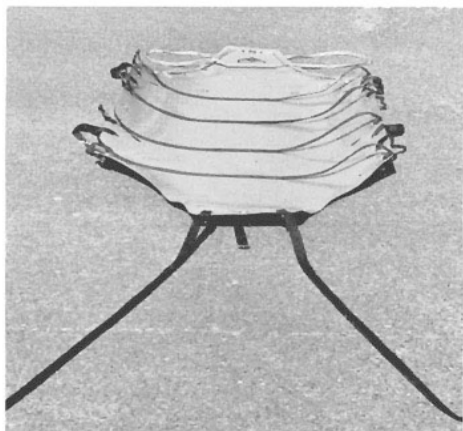


1. ROZBALTE SKED® NOSÍTKA A POLOŽTE JE ROVNĚ.



2. ZDVIHNĚTE BOČNÍ STRANY SKED® NOSÍTEK A UPEVNĚTE ČTYŘI KŘÍŽOVÉ POPRUHY DO SPON, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NAPROTI POPRUHŮM.

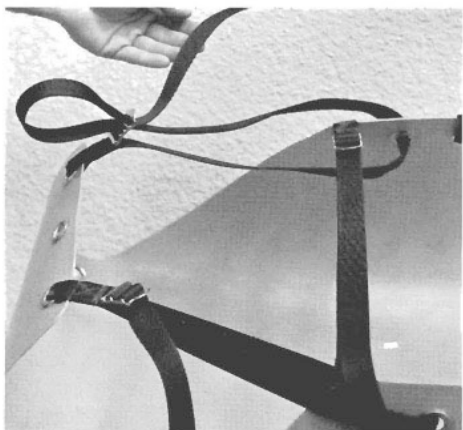

3. PŘETÁHNĚTE DOLNÍ POPRUHY SKRZ NEPOUŽITÉ LANOVÉ SMYČKY V DOLNÍ ČÁSTI SKED® NOSÍTEK A UPEVNĚTE JE DO SPON (TAK, JE TO ZOBRAZENÉ NA FOTCE NA TEXTEM).

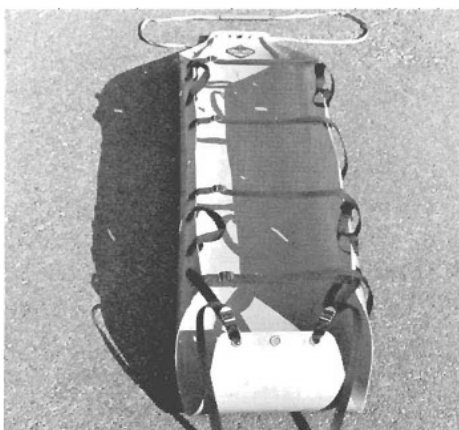

4. SKED® NOSÍTKA SE VŠEMI POPRUHY ZAJIŠTĚNÝMI SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM.

VODOROVNÝ VZESTUP/SESTUP

DVA NYLONOVÉ KUSY POPRUHU, OHODNOCENÉ NA 4,080 KG MBS/KUS, JSOU POUŽÍVANÉ U VODOROVNÉHO VZESTUPU/SESTUPU. HLAVOVÝ POPRUH JE O 15 CM KRATŠÍ NEŽ DOLNÍ POPRUH A POUŽÍVÁ SE VÝLUČNĚ NA STRANĚ HLAVY NOSÍTEK.



1. VLOŽTE JEDEN KONEC HLAVOVÉHO POPRUHU PŘES ZDVIŽNÝ BOD NA STRANĚ HLAVY NOSÍTEK.



2. PROVLÉČTE POPRUH POD SKED® NOSÍTKA A PŘES BOD NA OPAČNÉ STRANĚ HLAVY NOSÍTEK.



3. VYROVNEJTE POPRUH. ZOPAKUJTE TENTO POSTUP S DRUHÝM POPRUHEM NA DOLNÍ STRANĚ SKED® NOSÍTEK.



4. VYROVNEJTE VŠECHNY 4 POPRUHY A ZAJIŠTĚTE JE DO VELKÉ OCELOVÉ UZAMYKATELNÉ KARABINY.